



چک لیست نگهداری پیشگیرانه دستگاه اکسیژن ساز (ویرایش دوم)

مارک:
مدل:
سریال:

ردیف	مشخصه کنترلی	معیار پذیرش	دوره بازرسی	نتایج مشاهده شده																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
1	بازدید و بررسی میزان خلوص اکسیژن از مولد دستگاه	2 ± 80	روزانه																										
2	بازدید و بررسی میزان فشار اکسیژن خروجی از آخر خط تانک اکسیژن	حداقل 4 بار	روزانه																										
3	بازدید و کنترل سطح روغن کمپرسور	مطابق دستورالعمل ابلاغی واحد تجهیزات	روزانه																										
4	بازدید و کنترل فشار و دمای کمپرسور	مطابق دستورالعمل	روزانه																										
5	بازدید و کنترل کلیه شیرهای دستگاه و مدار اکسیژن ساز	مطابق دستورالعمل	روزانه																										
6	تخلیه اتودرین میکروفیلترها و بررسی سلامت شیر برقی روی اتودرین		روزانه																										
7	عملکرد صحیح کمپرسور و عدم وجود نشتی، روغن ریزی، ارتعاش، نویز و ...		روزانه																										
8	نظافت و بادگیری رادیاتور کمپرسور	عاری از گرد و خاک	حداقل هفته ای 2 مرتبه																										
9	نظافت و بادگیری فیلتر هوای ورودی کمپرسور	عاری از گرد و خاک	حداقل هفته ای 2 مرتبه																										
10	نظافت و بادگیری کندانسور درایر	عاری از گرد و خاک	حداقل هفته ای 2 مرتبه																										
11	بررسی کامل مولد شامل مواردی از قبیل شکستگی، نشتی اتصالات و پایپ ها، نشتی شیرها و نشتی گیج	سلامت فیزیکی	مطابق با دستورالعمل کمپانی سازنده																										
12	سنسور اکسیژن حداقل یکبار در سال کالیبره گردد و در صورت فرا رسیدن تاریخ انقضا، سنسور، تعویض شود(در صورتی که سنسور گالوانیک است)	انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																											
تاریخ																													
ساعت																													
امضا فرد بازدید کننده																													

امضا تأیید کننده (واحد تجهیزات پزشکی)



چک لیست نگهداری پیشگیرانه دستگاه اکسیژن ساز(ویرایش دوم)

مارک:
مدل:
سریال:

نتایج مشاهده شده

ردیف	مشخصه کنترلی	پذیرش	دوره بازرسی	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13	تعویض المنت فیلترهای اولیه و ثانویه		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
14	تعویض روغن		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
15	تعویض فیلتر روغن		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
16	تعویض فیلتر سپراتور		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
17	تعویض فیلتر هوا		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
18	تعویض کیت آنلودر		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
19	تعویض تسمه		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
20	تعویض کیت مینیوم پرشر ولو		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
21	تعویض کاسه نمد ایرند		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
22	تعویض بلبرینگ های الکتروموتور		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
23	تعویض بلبرینگ های ایرند		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
24	انجام اورهال کمپرسور		انجام توسط شرکت نمایندگی و یا ثالث مجاز و بازه زمانی مطابق با نظر کمپانی سازنده																															
25	در صورت تعویض قطعه ای خارج از آیتم های مذکور لطفا ذکر گردد.																																	
تاریخ																																		
ساعت																																		
امضا فرد بازدید کننده																																		

امضا تائید کننده(واحد تجهیزات پزشکی)